

000/0060.052/20



## Coohy-tex Facemask, Hydrogelverband (30cm x 40cm)

Versorgung aufgeschürfter und versengter Haut.  
Coohy-tex kühlt die erhitzte Haut, lindert den Schmerz  
und schützt gegen Infektionen.



### Eigenschaften

- Maße: 30 x 40 cm.
- Wasserreicher Hydrogelverband.
- Coohy-tex kühlt die erhitzte Haut und lindert den Schmerz.
- Klebt nicht in der Wunde.
- Schützt die Wunde gegen Infektionen und Austrocknung.
- Vermindert Narbenbildung.
- Passt sich den Körperkonturen perfekt an. Schmerzlose Entfernung.
- Anti-allergen.
- Biologisch abbaubar.

### Anwendungen

Erstversorgung von: kleinen Schürf- und Schnittwunden, Verbrennung ersten Grades, überhitzter, ausgetrockneter Haut.

### Verwendung

- Die Verpackung öffnen und den Verband entnehmen.
- Den Hydrogelverband mit der Textilseite nach oben auf die Wunde legen und die Folie entfernen.
- Dann mit einem Verband befestigen.
- Einen Arzt konsultieren.
- Der Hydrogelverband darf höchstens 12 Stunden auf der Wunde verbleiben.

## Haltbarkeit

- Erstversorgung von: kleinen Schürf- und Schnittwunden, Verbrennung ersten Grades, überhitzter, ausgetrockneter Haut.

Coohy-tex ist ein medizinisches Hilfsmittel.

**Stand: 28/03/2024**