

000/0080.011/20



Kalt-/Warmkompressse mit Überzug

Die Kalt-/Warmkompressse ist ein wiederverwendbarer Eisbeutel und eine Wärmequelle. Die Kompressse ist überall verwendbar, wenn eine Thermotheapie erforderlich ist.

Eigenschaften

- Maße: 11 x 29 cm.
- Wirkung der Kaltkompressse: lokal schmerzlindernd, abschwellend, entzündungshemmend.
- Wirkung der Warmkompressse: lokal durchblutungsfördernd, spannungslösend.
- Dank des Überzugs, kann die Kompressse gut positioniert und befestigt werden.
- Wiederverwendbar.

Verwendung

KALTANWENDUNG

- 2 Stunden in Gefrierfach oder Tiefkühltruhe legen.
- In ein Tuch einschlagen.

WARMANWENDUNG

- Ca. 5 Minuten in max. 80°C heißem Wasser erwärmen oder für maximal 1 Min. bei 650 Watt in den Mikrowellenherd legen.
- In ein Tuch einschlagen.

Inhalt

- 6 Stück.

Haltbarkeit

- Kalt: Im Gefrierfach aufbewahren.

- Warm: Bei Zimmertemperatur aufbewahren.
- Verfalldatum: 60 Monate nach Produktion.
- Individuelles Produkt: siehe Verpackung.

Die Kalt-/Warmkompressen sind ein medizinisches Hilfsmittel.

Stand: 20/04/2024

