

000/0080.041/20



Contusio Duopatch

Das Wärmepflaster Contusio Duopatch lindert mit seiner angenehmen und gut verträglichen Wärme Muskelverspannungen, -Ermüdung, Arthritis und Menstruationsbeschwerden innerhalb eines Zeitraums von ca. 8 Stunden. Contusio Duopatch wurde dermatologisch getestet und lässt sich unauffällig unter der Bekleidung tragen.

2 Wärmezonen: wird wärmer, hautfreundlicher.




Eigenschaften

- Positive Wirkungen der Wärme: Sie regt die Durchblutung an. Wärme verbessert die Durchblutung durch Erweiterung der Blutgefäße. Dies wiederum erhöht die Zufuhr von Sauerstoff und vitalen Nährstoffen zu den Zellen des Muskelgewebes.
- Sie erhöht die Eliminierung von sekundären Metaboliten: Das von den Zellen und Muskeln produzierte Abfallmaterial wird dank einer besseren Durchblutung leichter abtransportiert.
- Sie lindert Schmerzen: Wärme reduziert Verspannungen und verbessert die Beweglichkeit.

Verwendung

- Die zu behandelnde Zone gründlich reinigen und abtrocknen.
- Das Produkt aus der Verpackung entnehmen und die Schutzfolie entfernen.
- Das Pflaster mit der Klebeseite auf die Haut über der schmerzhaften Stelle auflegen und sicherstellen, dass es mit der gesamten Oberfläche auf der Haut haftet.
- Das Pflaster darf sich nicht überlappen (zum Beispiel um das Handgelenk). (Es kann ca. 30 Minuten dauern, bis die erforderliche Temperatur erreicht ist).
- Das Pflaster für mindestens 8 Stunden tragen.
- Bei Menstruationsschmerzen: das Pflaster mit der Klebeseite auf die Unterwäsche auflegen (nicht sofort auf die Haut) und sicherstellen, dass es perfekt haftet.

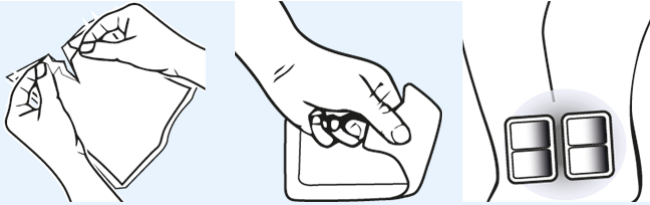

Inhalt

3 Packungen à 6 Stück

Haltbarkeit

- Ungeöffnet und trocken aufbewahren, nicht der direkten Sonneneinwirkung aussetzen.
- Haltbarkeit: 5 Jahre haltbar nach Produktionsdatum bei ordnungsgemäßer Lagerung und geschlossener Verpackung
- Produktionsdatum: siehe Verpackung

Contusio Duopatch ist ein medizinisches Hilfsmittel.

Stand: 27/06/2026