



000/5160.404/30

## FFP2-Staubmaske - 10 Stück (Mumu)

Die FFP2 NR Atemschutzmaske schützt den Träger und seiner Umgebung gegen leichtflüchtige feste oder flüssige Partikeln.

Effektiver Schutz vor Aerosolen, auch in der Industrie verwendbar.

### Eigenschaften

- Weiße, faltbare Staubmaske, gehört zur Kategorie der PSA
- Atemschutzklasse FFP2 NR nach der Prüfnorm EN 149:2001+A1:2009
- CE geprüft unter Nummer 2841, Marke Mumu
- 5-lagig
- Elastische Ohrschlaufen
- Garantieren einen schnellen, festen Sitz mit angenehmer Passform
- Anpassbares Nasenstück, auch Brillenträger geeignet
- Einzeln verpackt
- Inklusive Gebrauchsanweisung

### Anwendungen


Die Atemschutzmaske schützt die tragende Person sowie seine Umgebung vor kleinsten luftgetragenen Partikel und Tropfen. Passt sich dank der selbstspannenden Kopfbänder und des anpassbaren Nasenstücks komfortabel der Gesichtsform an.

## Verwendung

### 4 Schritte:

1. Nehmen Sie die Maske heraus, nachdem Sie Ihre Hände gereinigt und sichergestellt haben, dass die Verpackung nicht beschädigt ist.
2. Halten Sie die Maske über Nase und Mund, und führen Sie die Bänder hinter den Ohren entlang. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Mund und Ihre Nase bedecken. Dann legen Sie die Schlaufen über Ihre Ohren.
3. Pressen Sie den Bügel gegen Ihre Nase, um einen passgenauen Abschluss zu erreichen.
4. Prüfen Sie den Sitz der Maske. Stellen Sie sicher, dass keine Undichtigkeiten an Nase oder Maskenrand festzustellen sind, um einen korrekten Sitz zu erzielen.

Die Einwegmaske muss nach dem Ende jeder Arbeitsschicht (= max. 8 Stunden) / wenn nass, verschmutzt oder beschädigt entsorgt werden.

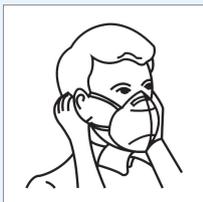

## Inhalt

10 Stück/Box

Einzel verpackte Atemschutzmasken

## Haltbarkeit

3 Jahre haltbar nach Produktionsdatum bei ordnungsgemäßer Lagerung und geschlossener Verpackung.

Produktionsdatum: siehe Verpackung

Bei Zimmertemperatur aufbewahren.

CE 2841-Kennzeichnung nach (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA), gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009

**Stand: 29/03/2024**