



000/0070.022/00

# Augen-Notfall-Station

Auch sichtbar im Dunkeln, da selbstleuchtend

Erste-Hilfe-Station bei Augenverletzungen



## Eigenschaften

- Maße: 22 x 58 cm.
- Inklusive Spiegel. Lieferung ohne Zubehör. Zubehör separat bestellbar (\*): siehe **Anwendungen**.
- Einfache Befestigung.
- Wetterfest durch Oberflächen-Versiegelung.
- Beständig gegen UV-Strahlen.
- Auch geeignet für Arbeitsplätze mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Gut sichtbar im Dunkeln, da selbstleuchtend (konform DIN67510).
- Lange Nachleuchtdauer (> 12 Stunden). Nachleuchtintensität in Mcd/cm<sup>2</sup>:

Mcd/cm <sup>2</sup> (*)	Nach 1 Min.	Nach 10 Min.	Nach 60 Min.
Hinweiszeichen MExT	550	62	8.3
DIN 67510	200	20	2.8

(\*) Mcd = Milli-Candela, eine Einheit der Lichtstärke

## Anwendungen

Erste-Hilfe-Station bei Augenverletzungen. Platz für 1x [Ycla Neutral 200 ml](#), 1x [Ycla 500 ml](#), 5x [Ycla Miniflakons 20ml](#) und 1x [Augenfremdkörperentferner](#) (\*)

## Verwendung

1. Die Ycla Wandhalterungen (grün und blau) von hinten durch die vorgesehenen Öffnungen

einführen.

2. Die Station an der Wand befestigen.
3. Die Kappe der Ycla Flasche und der Ycla Neutral Flasche abnehmen und die Flaschen in die Wandhalterungen schieben.
4. Den Augenfremdkörperentferner in die Halterungen oberhalb des Spiegels klicken.
5. Die Ampullen in die Halterungen unten einrasten.

**Stand: 02/05/2024**