

000/0130.011/30

Noseblot, absorbierendes Schwämmchen bei Nasenbluten



100% sicher und rein

exklusiv bei MExT erhältlich

Noseblot ist ein expandierender Schwamm zur Behandlung von Nasenblutungen.



Eigenschaften

- Noseblot dehnt sich nach der Befeuchtung schnell aus und passt sich gut an die Anatomie der Nase an
- Absorption beginnt innerhalb von 0-2 Sekunden
- 100% Ausdehnung in 7 Sekunden bei 37°C
- Verklebt nicht mit der Naseninnenhaut: Lässt sich leicht entfernen, wodurch die Gefahr einer erneuten Blutung reduziert wird
- Staub-, faser- und latexfrei: extrem geringes Allergierisiko
- Biologisch abbaubar

- Einzeln und steril verpackt
- Maße: 4,5 x 2 cm

Anwendungen

Zur Behandlung von Nasenbluten (Epistaxis)

Verwendung

- Waschen Sie sich die Hände, bevor Sie das Noseblot aus der Verpackung nehmen.
- Achten Sie stets darauf, dass mindestens 1 cm des Noseblots außerhalb der Nase verbleibt.
- Das Schwämmchen wird weich und dehnt sich aus, wenn es mit Blut in Kontakt kommt. Noseblot passt sich perfekt an die Nasenhöhle an und bleibt fest an Ort und Stelle.
- Nach Ablauf von 10 bis 15 Minuten, wenn die Blutung gestillt ist, entfernen Sie das Noseblot vorsichtig. Wenn die Blutung nicht gestillt wurde, wiederholen Sie die Behandlung mit einem neuen Noseblot. Wenn die Blutung nach der zweiten Behandlung nicht gestillt wurde, konsultieren Sie einen Arzt.



Inhalt

3 Packungen à 3 Stück

Haltbarkeit

- Trocken und bei 5 bis 35°C aufbewahren
- Vor direktem Sonnenlicht und Hitze schützen
- Zum einmaligen Gebrauch
- Haltbarkeit: 5 Jahre nach Produktionsdatum

Dieses Produkt ist ein steriles Medizinprodukt der Klasse I, CE 1639 geprüft nach MDR.

Stand: 18/05/2024