

000/2000.040/00



## Vakuummatratze

Die Vakuummatratze sorgt für eine schnelle, effektive und komfortable Ruhigstellung weil sie sich der Körperform des Patienten exakt anpasst. Auf diese Weise wird das Rückgrat optimal geschützt. Die Vakuummatratze ist mit dem innovativen MaxiValve™ Ventilsystem ausgerüstet.

### Eigenschaften

- Maße: 80 x 71 x 15 cm.
- Aufgefaltet: 200x75x6.4 cm.
- Gewicht Matratze: 5.5 kg.
- Gewicht Matratze, Pumpe & Tragetasche: 7.6 kg.
- Ist zwischen -34°C und 66°C zu verwenden.
- Flexibel. Röntgenstrahldurchlässig und MRI-Kompatibel.
- CE-geprüft. Die Matratze (dreifach faltbar) wird in einer Tragetasche mit einem Reparaturkit und manuellen Pumpe geliefert.
- Innovatives MaxiValve™ Ventilsystem: Klickkontrolle (bei richtiger Abwendung), Öffnung zur leichten Verwendung, sogar mit Handschuhen.
- Keine einzelnen Zubehörteile.
- Dauerhaftes Produkt: Lebenserwartung zwischen 5 und 10 Jahren bei normaler Verwendung unter normalen Umständen.
- Wurde zur Verwendung bei den Olympischen Spielen von 1994, 1996 und 2002 ausgewählt.

### Verwendung

- Der Einsatzhelfer, der dieses professionelle ärztliche Instrument einsetzt, muss einer Schulung beigewohnt haben und für den Einsatz bei Notfällen entsprechend ausgebildet worden sein.
- Es müssen mindestens 2 Helfer bei den Seitengriffen eingesetzt sein. Die Größe und das Gewicht des Patienten bestimmen die Anzahl der Helfer, die erforderlich sind, um ihn korrekt anzuheben und zu transportieren.
- Jeder Matratze liegt ein Schulungsvideo bei.

### Inhalt

- Matratze: Vinylpolyester / mit Polystyrolkugeln (feuerbeständig).
- MaxiValve™ Ventil aus Plastik / Sprungfeder aus rostfreiem Stahl.
- Tragetasche aus Nylon.
- Vakuumpumpe: Zylinder aus Aluminium.
- Gurte: technischer Kunststoff "Delrin".

## Haltbarkeit

- Heben Sie die Matratze NIE von oben oder von unten an. Verwenden Sie dazu ausschließlich die seitlich angebrachten Griffe in den Gleichgewichtspunkten.
- Bei Verwendung mit einer anderen Tragbahre, muss immer kontrolliert werden, ob die Matratze und die andere Bahre gut aneinander befestigt worden sind bevor Sie den Patienten anheben.

Die Vakuummattatze ist ein medizinisches Hilfsmittel.

**Stand: 02/05/2024**