

000/2100.010/00



## Vakuumschienenenset - 3 Stück

Die Vakuumschienen bieten eine komfortable Lösung für fast alle Brüche oder Verstauchungen, von verrenkten Schultern bis hin zu rechtwinkligen Handbrüchen.

### Eigenschaften

- Large: 102 x 76 x 2.5 cm.
- Medium: 70 x 51 x 2.5 cm.
- Small: 50 x 33 x 2.5 cm.
- Zusammengelegt: 61 x 28 x 28 cm.
- Gewicht: 2,9 kg.
- Temperatur: -34° C bis 82° C.
- Nimmt die Form der gebrochenen oder verrenkten Gliedmaße an.
- Wärmedämmung.
- Wasserbeständig.
- Röntgenstrahldurchlässig.
- Klettverschluss-Riemen.
- Immobilisiert in 30 Sekunden.
- Easy-Click-Pumpsystem.
- 1 Jahr Garantie.CE-geprüft. NSN (genehmigt durch US Defence Medical Standardization Board).

### Verwendung

- Die Kugeln gleichmäßig über die Schiene verteilen.
- Die Schiene rund um den verrenkten oder gebrochenen Körperteil wickeln.
- Leicht mit Riemen befestigen.
- Die Pumpe am Ventil festklicken.
- Die Luft aus der Schiene (+/- 20 Sekunden) pumpen, bis die Schiene ganz hart wird.
- Die Riemen gut befestigen.
- Um Luft in die Matratze strömen zu lassen: Die Riemen lösen.
- Ca. zehn Sekunden auf das Ventil drücken, bis die Schiene wieder elastisch wird.

## Inhalt

- Set 3 Stück.

## Haltbarkeit

- 10 Jahre haltbar.
- Nicht der extremen Hitze aussetzen.

Die Vakuumschienenset besteht aus medizinischen Hilfsmitteln.

**Stand: 27/04/2024**

