


Dank der kohäsiven Eigenschaften von ECV muss jede Lage die vorige nur zu einem Drittel bedecken. So sparen Sie im Gegensatz zu den klassischen Verbänden Zeit und Material. Der Verband kann faltfrei angebracht werden.

ECV 5 blau garantiert einen konstanten und regelbaren Druck.

Verwendung

- Elastizität der ECV-Binde nicht komplett ausreizen, da eine zu große Spannung die Blutzirkulation beeinträchtigen könnte
- Um den Verband korrekt anzubringen, muss die Krepstruktur jederzeit sichtbar bleiben
- Fortfahren mit dem Verbinden, wobei jede Lage die vorherige zu einem Drittel bedeckt
- Die letzte Lage vollständig über die vorige anbringen und andrücken
- Bei Durchnässen durch Blut oder Flüssigkeit die Binde wechseln

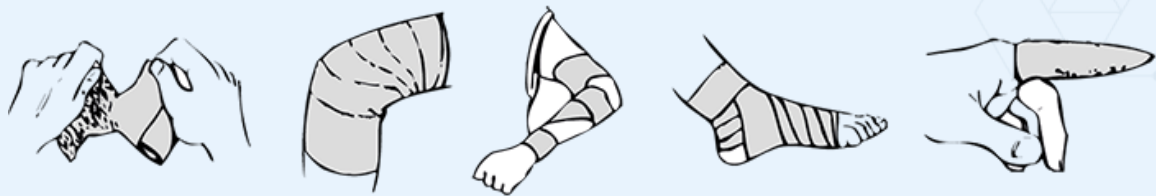

Inhalt

2 Packungen à 4 Stück

Haltbarkeit

- ECV 5 blau wurde in einer Plastikfolie verpackt
- Ungeöffnet an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort zwischen 10 und 25°C aufbewahren. Direktes Sonnenlicht vermeiden.
- Haltbarkeit: 5 Jahre haltbar nach Produktionsdatum bei ordnungsgemäßer Lagerung und geschlossener Verpackung

Dieses Produkt ist ein medizinisches Hilfsmittel Klasse I und CE zertifiziert.

Stand: 08/03/2026