

000/0020.126/30



Hydroskin, wasserdichtes Hydrogelpflaster

Hydroskin ist ein selbstklebender transparenter Wundverband mit Hydrogel. Der transparente Film sorgt für absoluten Schutz vor Nässe und Mikroorganismen.



Eigenschaften

- Elastischer Folienwundverband. Stoßdämpfende Hydrogelaufgabe, verklebt nicht mit der Wunde.
- Polyurethanfilm um die Auflage: undurchlässig für Wasser, Fett, Öl und Bakterien von außen nach innen. Durchlässig von innen nach außen, so dass die Haut ausreichend atmen kann und überschüssige Wundnässe entfernt wird. Hohe Klebekraft, hypoallergen.
- Hydrogelaufgabe. Die Hydrogel spendet Feuchtigkeit an das abgestorbene Gewebe und absorbiert überschüssiges Exsudat aus der Wunde. So wird ein stabiles 'Mikroklima' für Wundheilung erzeugt: Die Kombination aus Hydrogel, Wundnässe und Sauerstoffmangel erzeugt eine nasse Wundumgebung, wodurch die Haut in der Wunde schneller regeneriert. Kann die Angiogenese* fördern.

Hydrogel wirkt schmerzlindernd und hat eine beruhigende Wirkung. Keine Verkrustung der Wunde. Hinterlässt keine Rückstände und minimiert Schmerzen beim Verbandwechsel.

- Einzeln und steril verpackt.

*Angiogenese ist ein physiologischer Prozess, bei dem neue Blutgefäße aus bereits vorhandenen wachsen und tritt unter anderem bei der Wundheilung auf. Die Angiogenese unterstützt die Wundheilung, indem sie notwendige Blutbestandteile in verletzte Bereiche transportiert und so das Gewebewachstum und die Regeneration fördert.

Anwendungen

Zur Versorgung von Schnitt- und Schürfwunden. Nicht geeignet für stark blutende, tiefe oder infizierte Wunden.

Ideal für die Versorgung von Blasen an den Füßen

Nicht geeignet für stark blutende, tiefe oder infizierte Wunden

Verwendung

ANWENDEN




- Zuerst die Wunde reinigen.
- Die sterile Kompresse aus der Verpackung nehmen.
- Eine Hälfte der transparenten Schutzfolie abziehen, auf der Wunde bzw. Haut positionieren, glatt streichen und die verbleibende Hälfte abziehen.
- Die weißen Schutzfolien entfernen.

ENTFERNEN

- Das Pflaster kann entfernt werden, indem es an einer Ecke gelöst und parallel zur Haut ausgedehnt wird.

ERSETZEN

- Bei exzessivem Wundexsudat sollte Hydroskin Metaldetect rechtzeitig ersetzt werden.
- Wenn weniger oder wenig Exsudat vorhanden ist, kann Hydroskin Metaldetect alle 2-3 Tage gewechselt werden, bis die Wunde verheilt ist.

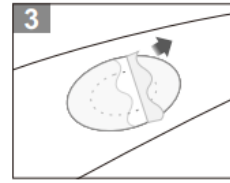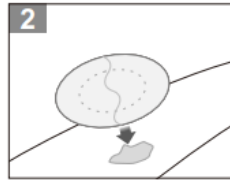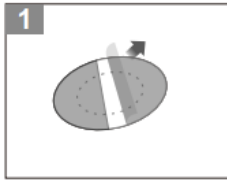

Inhalt

24 Stück

Haltbarkeit

- Kühl und trocken bei Zimmertemperatur lagern.
- Verfalldatum: 36 Monate haltbar nach Produktionsdatum.

Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt Klasse I steril, CE0123 zugelassen.

Stand: 15/04/2026