

000/2100.101/00



Stifneck - 4 einstellbare Größen


Der Stifneck Select ist eine einfache Lösung, um die Halswirbelsäule eines Patienten, bei dem das Risiko eines Halswirbelbruchs besteht, befristet zu fixieren.

Eigenschaften

- Maße: 55 x 15 cm.
- Kunststoff (PVC).
- Stoßdämpfende Schaumschicht.
- Klettverschluss-Streifen.

Verwendung

- Die Höhe des Nackens messen (zwischen der Schulter und der Kinnunterseite).
- Den Stifneck auf die gewünschte Größe durch Ziehen am Stützband einstellen.
- Den Stifneck in gewünschter Größe verriegeln.
- Die stoßdämpfende Schaumschicht der Halsform anpassen.
- Den Stifneck rund um den Hals des Patienten gemäß den Zeichnungen legen.
- Den Patienten ins Krankenhaus bringen oder die befugten Instanzen benachrichtigen.

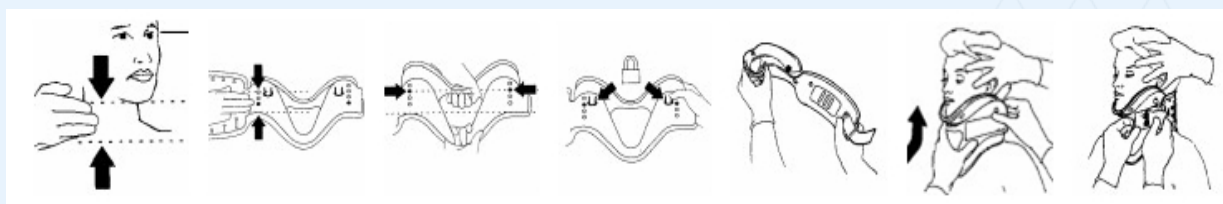

Haltbarkeit

- Es empfiehlt sich, den Stifneck Select nur einmal zu verwenden.

Der Stifneck Select ist ein medizinisches Hilfsmittel.

Stand: 08/08/2025